

MONTEBIO™ Norovirus GI + GII



IVD

ANMAT PM-246-39

PRINCIPAL CAUSA DE BROTES DE GASTROENTERITIS POR INTOXICACIÓN ALIMENTARIA EN EL MUNDO

TEST RÁPIDO PARA LA DETECCIÓN CUALITATIVA DE ANTÍGENOS DE NOROVIRUS GI Y GII

MÉTODO MÁS RÁPIDO QUE LA MICROSCOPIA ELECTRÓNICA, RT-PCR Y PCR

ALTA SENSIBILIDAD Y ESPECIFICIDAD

RESULTADOS EN 10 MINUTOS

PRECIO COMPETITIVO

ALMACENAMIENTO ENTRE 2° Y 30°C



MONTEBIO

Oficina y Depósito: Vera 575 (C.A.B.A.)
Tel/FAX: (54 11) 4858-0636 (Rotativas)
Web: www.montebio.com.ar
E-mail: info@montebio.com.ar

MONTEBIO™ Norovirus GI + GII

PROCEDIMIENTO

RECOLECCIÓN DE LA MUESTRA

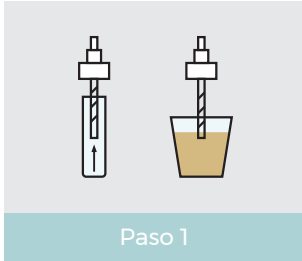

Desenrosque y remueva el tubo aplicador de dilución. Evite derramar o salpicar la solución del tubo. Recolecte la muestra insertando el aplicador en tres lugares distintos de la materia fecal, obteniendo aproximadamente 50 mg. de la misma.



Coloque el aplicador nuevamente dentro del tubo y enrosque la tapa. Evite romper la punta del tubo de dilución. Agite vigorosamente el tubo de recolección para mezclar la muestra con el buffer extractor.


ANÁLISIS DE LA MUESTRA




1. Llevar el cassette a temperatura ambiente antes de su uso. Colocarlo sobre una superficie limpia y nivelada.



2. Tome un papel tissue y rompa la punta del tubo aplicador.

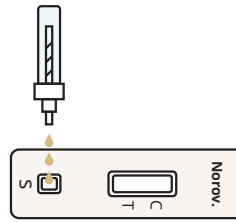

3. Sostenga el tubo en forma vertical y dispense 2 gotas de la solución en el pocillo de la muestra (S) del cassette. Evite la formación de burbujas en el pocillo.

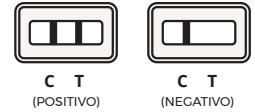

4. Lea el resultado a los 10 minutos.

PRECAUCIÓN: NO LEER LOS RESULTADOS PASADOS LOS 20 MINUTOS.

DATOS TÉCNICOS

Sensibilidad y Especificidad

Un total de 97 muestras de materia fecal de pacientes fueron analizadas con la prueba rápida para la detección de Norovirus GI y GII, en comparación con otras pruebas comerciales inmunocromatográficas para Norovirus GI y GII. Los resultados se muestran en la siguiente tabla:

Referencia	Prueba rápida Norovirus GI + GII		Total
	Positivo	Negativo	
Positivo	43	0	43
Negativo	1	53	54
Total	44	53	97

Sensibilidad relativa: 100%
Especificidad relativa: 98,1%
Concordancia: 99,0%

DATOS DEL PRODUCTO

- El kit contiene: 25 cassettes empaquetados individualmente, 25 tubos aplicadores con buffer y 1 ficha técnica.
- Almacenar a 2 - 30° C hasta la fecha de caducidad impresa en la bolsa sellada.
- La prueba debe permanecer cerrada hasta su uso.