

MONTEBIO™ Dimero - D



IVD

ANMAT PM-246-17

DETECCIÓN CUALITATIVA DE DIMERO-D EN SANGRE ENTERA/PLASMA

RESULTADOS EN 10 MINUTOS

ALTO NIVEL DE SENSIBILIDAD (CUT-OFF 500 ng/ml)

NO REQUIERE NINGÚN EQUIPAMIENTO ADICIONAL

PRECIO COMPETITIVO

ALMACENAMIENTO ENTRE 2° Y 30° C

ÚTIL PARA SOSPECHA DE COAGULACIÓN INTRAVASCULAR DISEMINADA,
TROMBOSIS VENOSA PROFUNDA Y EMBOLISMO PULMONAR

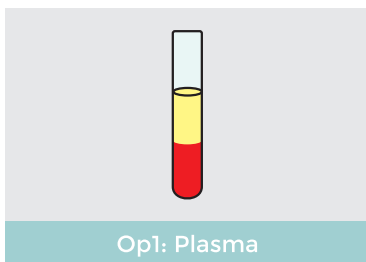

MONTEBIO

Oficina y Depósito: Vera 575 (C.A.B.A.)
Tel/FAX: (54 11) 4858-0636 (Rotativas)
Web: www.montebio.com.ar
E-mail: info@montebio.com.ar


MONTEBIO™ Dimero - D

PROCEDIMIENTO

RECOLECCIÓN DE LA MUESTRA



ANÁLISIS DE LA MUESTRA

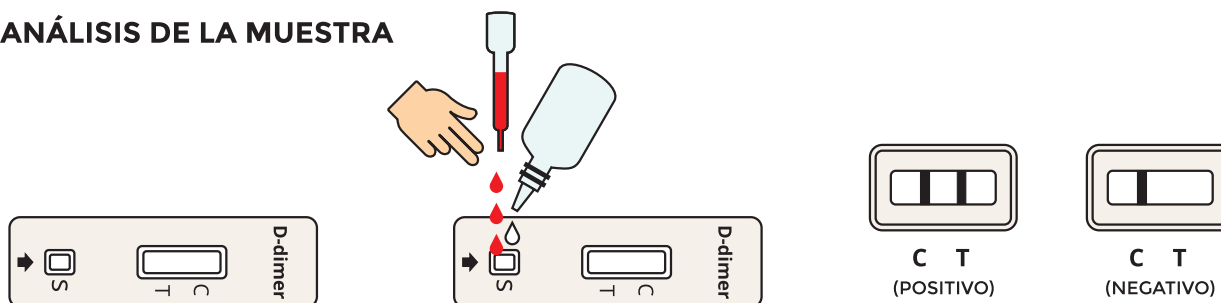

1. Llevar el cassette a temperatura ambiente antes de su uso. Colocarlo sobre una superficie limpia y nivelada.

2. Tome la pipeta desechable y vierta 1 gota de Plasma en el pocillo (S) del cassette. En caso de sangre entera, vierta 2 gotas con la pipeta y añada 1 gota de Buffer. Para sangre entera dactilar, deje caer 2 gotas de sangre directamente del dedo al pocillo y añada 1 gota de Buffer. Evite dejar burbujas de aire en el pocillo (S).

3. Lea el resultado a los 10 minutos.

PRECAUCIÓN: NO LEER LOS RESULTADOS PASADOS LOS 15 MINUTOS.

DATOS TÉCNICOS

La siguiente tabla muestra la concentración de compuestos (ng/ml) por encima de la cual se detecta resultados positivos a los 10 minutos:

PRUEBA	CUT-OFF
Dimero-D	500 ng/ml

DATOS DEL PRODUCTO

- El kit contiene: 40 cassettes empaquetados individualmente, 40 pipetas descartables, 1 solución buffer y 1 ficha técnica.
- Almacenar a 2 - 30° C hasta la fecha de caducidad impresa en la bolsa sellada.
- La prueba debe permanecer cerrada hasta su uso.