

MONTEBIO™ Drogas de abuso en sangre



IVD

ANMAT PM-246-27

PRIMER TEST RÁPIDO DE DROGAS EN SANGRE LANZADO AL MERCADO ARGENTINO

DETECCIÓN CUALITATIVA DE DROGAS DE ABUSO EN SANGRE ENTERA / SUERO / PLASMA

SUMAMENTE PRÁCTICO PARA EMERGENCIAS / GUARDIAS HOSPITALARIAS / CLÍNICAS

DETECTA 7 DROGAS SIMULTÁNEAMENTE (AMP, BAR, BZO, COC, MET, OPI, THC)

ALTO NIVEL DE SENSIBILIDAD

CONTROL DE TRAZABILIDAD DE LA MUESTRA AL TRABAJAR CON EL MISMO ESPÉCIMEN

ALMACENAMIENTO ENTRE 2° Y 30°C

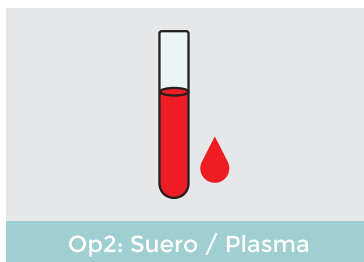

M O N T E B I O

Oficina y Depósito: Vera 575 (C.A.B.A.)
Tel/FAX: (54 11) 4858-0636 (Rotativas)
Web: www.montebio.com.ar
E-mail: info@montebio.com.ar


MONTEBIO™ Drogas de abuso en sangre

PROCEDIMIENTO

RECOLECCIÓN DE LA MUESTRA



ANÁLISIS DE LA MUESTRA

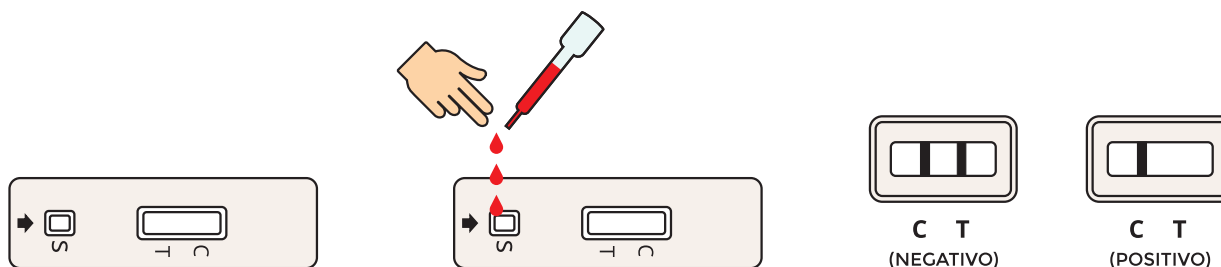

1. Llevar el cassette a temperatura ambiente antes de su uso. Colocarlo sobre una superficie limpia y nivelada.

2. Tome la pipeta desechable y vierta 3 gotas de sangre entera, suero o plasma en el pocillo (S) del cassette. En caso de sangre entera dactilar, dejar caer 3 gotas de sangre directamente desde el dedo sobre el pocillo. Puede también absorber con un capilar heparinizado la muestra y luego verterla sobre el pocillo.

3. Lea el resultado a los 5 minutos.

PRECAUCIÓN: NO LEER LOS RESULTADOS PASADOS LOS 15 MINUTOS.

DATOS TÉCNICOS

La siguiente tabla muestra la concentración de compuestos (ng/ml) por encima de la cual se detecta resultados positivos a los 10 minutos:

PARAMETROS	CALIBRADOR	CUT-OFF
AMP	D-ANFETAMINA	50 ng/ml
BAR	SECOBARBITAL	100 ng/ml
BZO	OXAZEPAM	100 ng/ml
COC	BENZOILECGONINA	50 ng/ml

PARAMETROS	CALIBRADOR	CUT-OFF
MET	D-METANFETAMINA	50 ng/ml
OPI	MORFINA	40 ng/ml
THC	11-NOR- Δ^8 -THC COOH	12 ng/ml

DATOS DEL PRODUCTO

- El kit contiene: 25 cassettes empaquetados individualmente, 25 pipetas descartables y 1 ficha técnica.
- Almacenar a 2 - 30° C hasta la fecha de caducidad impresa en la bolsa sellada.
- La prueba debe permanecer cerrada hasta su uso.