

MONTEBIO™ IgE Total, Inmunoglobulina E



IVD

ANMAT PM-246-16

PRIMER TEST RÁPIDO DE IgE TOTAL

DETECCIÓN CUALITATIVA EN SANGRE ENTERA / SUERO / PLASMA

RESULTADOS CON TAN SÓLO 2 GOTAS DE SANGRE DACTILAR

DETECCIÓN MÍNIMA 100 UI/ml

CORRELACIÓN CON "ELISA" EN UN 99,9%

NO REQUIERE NINGÚN EQUIPAMIENTO ADICIONAL

ALMACENAMIENTO ENTRE 2° Y 30°C

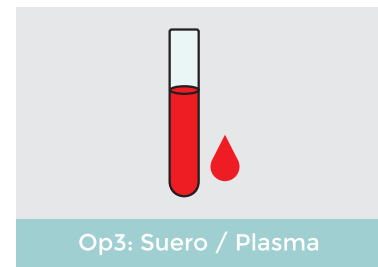

MONTEBIO

Oficina y Depósito: Vera 575 (C.A.B.A.)
Tel/FAX: (54 11) 4858-0636 (Rotativas)
Web: www.montebio.com.ar
E-mail: info@montebio.com.ar


MONTEBIO™ IgE Total, Inmunoglobulina E

PROCEDIMIENTO

RECOLECCIÓN DE LA MUESTRA



ANÁLISIS DE LA MUESTRA

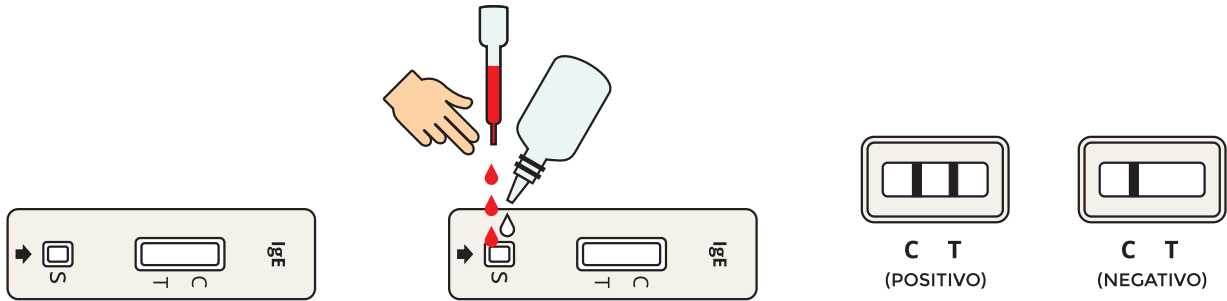

1. Llevar el cassette a temperatura ambiente antes de su uso. Colocarlo sobre una superficie limpia y nivelada.

2. Tome la pipeta desechable y vierta 2 gotas de suero/plasma en el pocillo (S) del cassette. En caso de sangre entera, vierta 2 gotas con la pipeta y añada 1 gota de Buffer. Para sangre entera dactilar, deje caer 2 gotas de sangre directamente del dedo al pocillo y añada 1 gota de Buffer. Evite dejar burbujas de aire en el pocillo (S).

3. Lea el resultado a los 10 minutos.

PRECAUCIÓN: NO LEER LOS RESULTADOS PASADOS LOS 15 MINUTOS.

DATOS DEL PRODUCTO

- El kit contiene: 40 cassettes empaquetados individualmente, 40 pipetas descartables, 1 solución buffer y 1 ficha técnica.
- Almacenar a 2 - 30° C hasta la fecha de caducidad impresa en la bolsa sellada.
- La prueba debe permanecer cerrada hasta su uso.