

MONTEBIO™ Salmonella



IVD

ANMAT PM-246-29

TEST RÁPIDO PARA LA DETECCIÓN CUALITATIVA DEL ANTÍGENO SALMONELLA EN HECES

SON LAS BACTERIAS RESPONSABLES DE LA FIEBRE TIFOIDEA Y PARATIFOIDEA

MÉTODO MUCHO MAS RÁPIDO QUE EL CULTIVO (24/48 HS)

PRECIO MUY COMPETITIVO

ALTO NIVEL DE SENSIBILIDAD Y ESPECIFICIDAD

RESULTADOS EN 10 MINUTOS

ALMACENAMIENTO ENTRE 2° Y 30°C


MONTEBIO

Oficina y Depósito: Vera 575 (C.A.B.A.)
Tel/FAX: (54 11) 4858-0636 (Rotativas)
Web: www.montebio.com.ar
E-mail: info@montebio.com.ar


MONTEBIO™ Salmonella

PROCEDIMIENTO

RECOLECCIÓN DE LA MUESTRA




Desensrosque y remueva el tubo aplicador de dilución. Evite derramar o salpicar la solución del tubo. Recolecte la muestra insertando el aplicador en tres lugares distintos de la materia fecal, obteniendo aproximadamente 50 mg. de la misma.

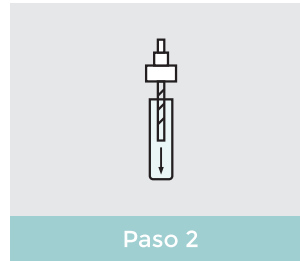

Coloque el aplicador nuevamente dentro del tubo y enrosque la tapa. Evite romper la punta del tubo de dilución. Agite vigorosamente el tubo de recolección para mezclar la muestra con el buffer extractor.

ANÁLISIS DE LA MUESTRA

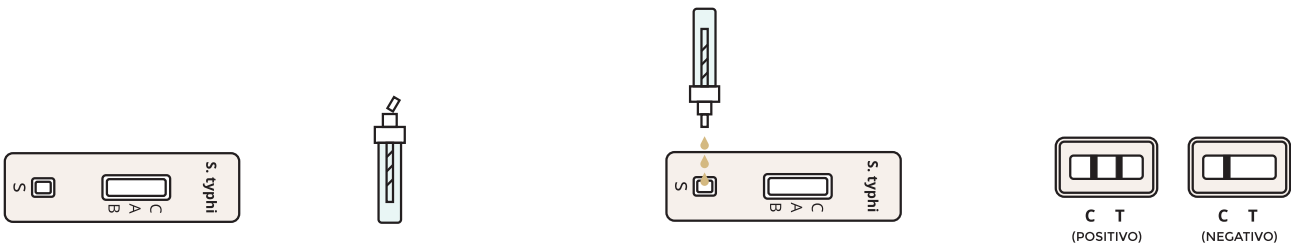

1. Llevar el cassette a temperatura ambiente antes de su uso. Colocar sobre una superficie limpia y nivelada.

2. Tome un papel tissue y rompa la punta del tubo aplicador.

3. Sostenga el tubo en forma vertical y dispense 3 gotas de la solución en el pocillo de la muestra (S) del cassette. Evite la formación de burbujas en el pocillo.

4. Lea el resultado a los 10 minutos.

PRECAUCIÓN: NO LEER LOS RESULTADOS PASADOS LOS 20 MINUTOS.

DATOS TÉCNICOS

Un total de 219 pacientes han sido el parámetro de comparación entre Test rápido S. Typhi / S. Paratyphi y el Cultivo:

Sensibilidad relativa: 92,6%
Especificidad relativa: 96,0%
Concordancia: 94,5%

		Test rápido Salmonella		
		+	-	Total
Cultivo	+	88	7	95
	-	5	119	124
		93	123	219

DATOS DEL PRODUCTO

- El kit contiene: 25 cassettes empaquetados individualmente, 25 tubos aplicadores con Buffer y 1 Ficha técnica.
- Almacenar a 2 - 30° C hasta la fecha de caducidad impresa en la bolsa sellada.
- La prueba debe permanecer cerrada hasta su uso.